

ÓRTESIS AFO PONSETI

Tratamiento del pie zambo



¿QUÉ ES?

Es una férula para el tratamiento del pie zambo mediante el Método Ponseti.


La férula está formada por dos componentes. Un calzado tipo sandalia con base moldeada de caucho y correas de ajuste en cuero y una barra regulable en longitud y construída en dorsi-flexión, a la que se unen mediante un sencillo sistema de clip.

El ángulo en el que están posicionadas las sandalias puede ser ajustado fácilmente para conseguir la abducción necesaria.

Sus materiales son hipoalergénicos y libres de látex, siendo muy bien tolerados.



Disponible en 3 colores

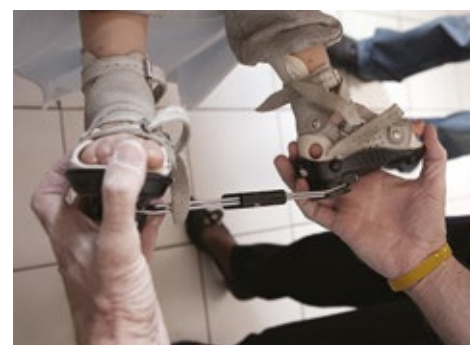

La función de la férula es mantener los pies del bebé en la posición correcta tras la fase correctiva de escayolado del método Ponseti. La férula se usa siempre para ambos pies, aunque el bebé presente solo un pie zambo.

Sandalias

La longitud del pie debe medirse en el punto más largo (por ejemplo, desde el talón hasta la punta del dedo gordo del pie). No tener en consideración el crecimiento del pie ya que está contemplado en la tabla.

Largo del pie (mm)	Talla de sandalia
60 a 62	Prematuros 1
63 a 66	Prematuros 2
67 a 70	0000
71 a 75	000
76 a 80	00
81 a 87	0
88 a 92	1
93 a 102	2
103 a 112	3
113 a 122	4
123 a 132	5
133 a 142	6
143 a 152	7
153 a 162	8
163 a 172	9
173 a 182	10
183 a 192	11
193 a 202	12



Nota:

Las sandalias de Prematuros 1, 2 vienen ya fijadas permanentemente a una barra ajustable.



Usualmente se recomienda que la longitud de la barra sea igual al ancho de hombros del paciente

Barras simples ajustables

Talla	Min. Ancho (cm)	Max. Ancho (cm)
Extra Peq.	17.3	25.0
Pequeña	20.0	30.0
Grande	23.5	37.8

Barras Dobbs

Talla	Min. Ancho (cm)	Max. Ancho (cm)
Pequeña	15.25	22.86
Regular	22.86	35.56